

非凡视界
高效舒适

 爱柯尼® OCULISTA

四区巩膜接触镜

RIGID SCLERAL CONTACT LENS



稳定清晰

4区FCCT设计
有效矫正不规则散光



持久舒适

边缘随动
强化佩戴舒适度




便捷安心

超等离子技术
镜片亲水抗污

巩膜镜是什么

巩膜镜又叫“硬性巩膜接触镜”，是一种特殊设计的大直径硬性透气性接触镜，镜片完全覆盖角膜及角膜缘，不接触角膜表面，而是直接着陆于巩膜（白眼球）上。

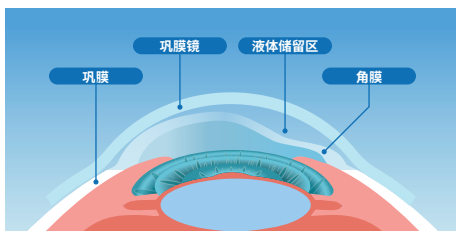

巩膜镜的作用

- 矫正视力

镜片与角膜之间一般填充无防腐剂生理盐水或专用润眼液包裹不规则的角膜，重新建立一个规则的光学界面，矫正不规则散光，改善视觉质量。

- 保护眼表

镜片完全覆盖角膜，避免镜片对角膜产生机械性损伤，同时通过中间的生理盐水或专用润眼液维持角膜湿润，缓解干眼症状。

巩膜镜的优势

- 舒适性高

由于镜片不接触角膜，减少了对敏感角膜的刺激，佩戴舒适度优于传统隐形眼镜。

- 视觉质量好

矫正效果优于传统框架眼镜和传统隐形眼镜，尤其适合各种不规则角膜散光患者。

巩膜镜的适应人群

该产品适用于矫正不规则散光，或同时合并有+15.00D至-20.00D，角膜规则散光小于5.00D的屈光不正患者。



巩膜镜的佩戴方式与时间

- 佩戴方式


日间佩戴

- 佩戴时间

初戴或长时间停戴后再戴者，从第一天戴 4-8小时开始，每天增加2小时。建议一次配戴最长不超过 12h 小时，配戴时间因人而异，不要超时配戴。（具体详见说明书或遵照眼科医生建议）

- 巩膜镜的复查周期

初次戴镜者应在配镜后第1天、第1周、第1月、第3月定期到医院复查，不适随诊。（具体详见说明书或遵照眼科医生建议）

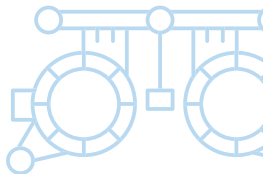

巩膜镜的更换周期

推荐更换周期1年（具体详见说明书或遵照眼科医生建议）

 爱柯尼® OCULISTA 四区巩膜接触镜

RIGID SCLERAL CONTACT LENS



爱柯尼®小红书官方账号



爱柯尼®微信小程序



爱柯尼®知乎官方账号

生产企业：湖南朗星医疗科技有限公司

注册证编号：国械注准20253160121

医疗器械生产许可证编号：湘药监械生产许20240054号

代理/售后服务机构：上海瑞申视医疗科技有限公司

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书。